

MO Ultralight Flip-up

Ultralight lupporna är anpassade till din bästa personliga arbetsställning. Börja öva med lupporna under lättare arbetsuppgifter. Undvik häftiga och onödiga rörelser med huvudet när du ser igenom lupporna.

Man får en bra översyn över munnen förbi lupporna. Undvik tittandet i munnen över lupporna ty då måste nacken böjas för mycket.

Genom att vid behov svänga på patientens huvud kan du arbeta med en god ergonomisk ställning under hela dagen. Det går också lätt att vika upp (Flip-Up) lupporna mot pannan vid behov.


Rengöring

Framlinssidan av lupporna är helt vattentät. Den viktiga justerbarheten av arbetsavståndet gör okularsidan mindre säker så låt bli att tvätta lupporna under rinnande vatten. De enkla ytorna får man snabbare rensat med en fuktad duk.


Snabbrengöring

Rengör objektivens linser med en av vatten delvis fuktad mjuk pappersduk och torka med papperets torra del. Vik upp lupporna och rengör också glasögonlinserna. Undvik att vata gångjärnet eftersom det kan inverka på dess friktion.

Fukta pappersduken med 70% alkohol för en noggrannare rengöring. Lupporna bör förvaras och användas i rumstemperatur.

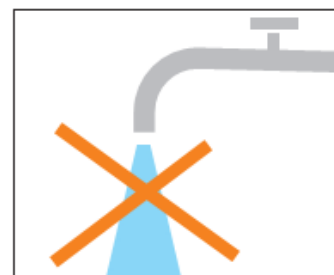


Lätthanterlig flip-up

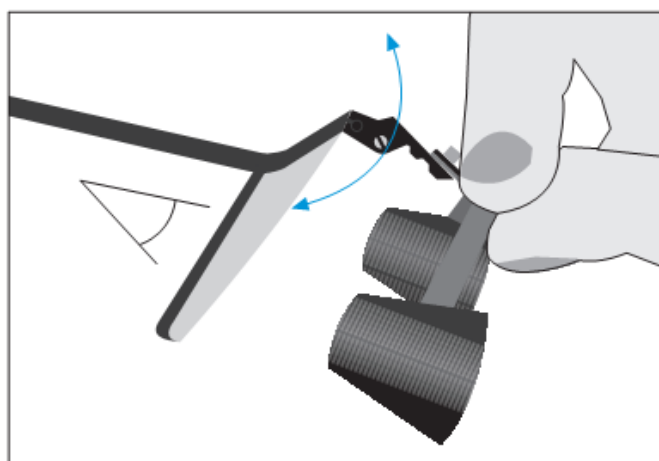

Vik upp lupporna aseptiskt med att vidröra endast "handtaget" på luffästet. Handtaget kan rengöras med vilket rengöringsmedel som helst.


Justering av gångjärnet

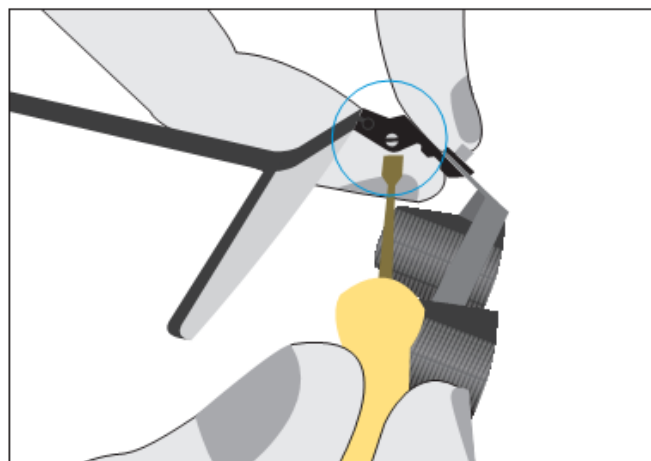

Ett nytt gångjärn kan behöva justeras i början av användningen. Undvik att spänna skruven för hårt. Det är tillräckligt när lupporna hålls av sig själva i uppvikt läge och i sin nedre position bör okularen vila mot glasögonlinserna.

Fastsättning och löstagning av lupporna:

Gångjärnet/snabbkopplingen knäpps på plats och lösgöres endast i det övre läget.

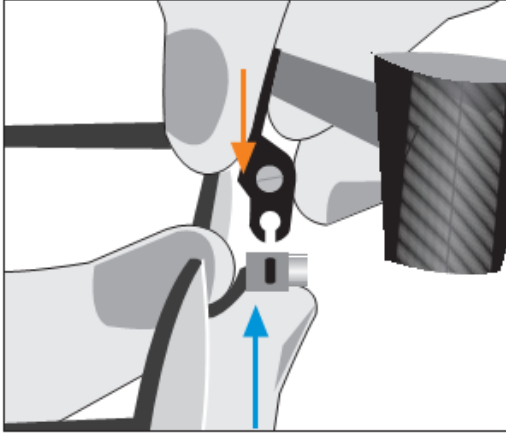

Fastsättning:

Stöd med fingret under fästknoppen och tryck gångjärnet uppifrån ända till botten.

Löstagning:


Dra uppåt vid gångjärnet på motsvarande sätt. Snabbkopplingen kommer lätt loss ifrån knoppen när du hittar det rätta läget uppåt.

Justering av arbetsavstånd:

Lupporna har en basinställning som motsvarar ditt arbetsavstånd. Om det trots allt inte ger den bästa möjliga synkomforten och ergonomin kan du justera luppornas brännvidd till det rätta arbetsavståndet. Med denna justering kan du också kompensera förändringarna till en viss mån i din presbyopi.

Justeringen sker med ett bifogat verktyg som placeras i okularets skårer:

- lösgör lupporna från glasögonen
- tag ett stadigt grepp om luppkonen och placera verktyget i skårorna

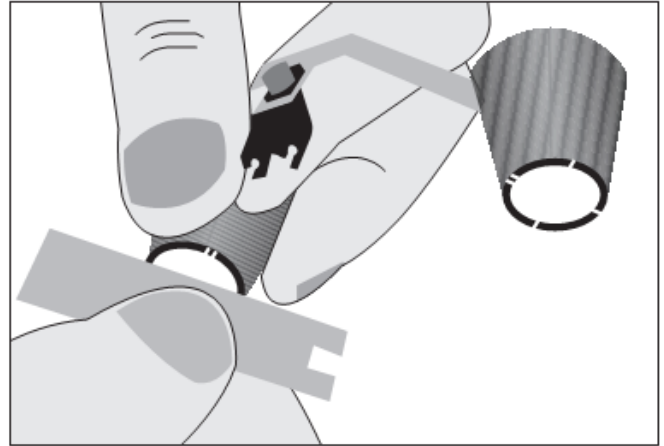


- ett kvarts varvs justering motsvarar ett avstånd på

1 cm EASY (2,0x)

1,5 cm ERGO (2,5x)

2 cm ENDO (3,0x)

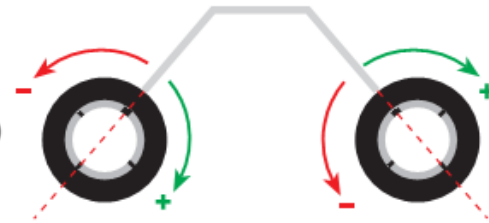

- Det är viktigt att justeringen sker lika mycket och också alltid åt samma håll på de båda luppkonerna (då är de båda okularens breda skårer på samma håll med avseende på lupparnas fäste).

Om du behöver ett längre avstånd
justerar du okularerna inåt (medsols +).

Behövs det ett kortare avstånd
vrider du dem utåt från konen (motsols -).

www.MOptics.se

MeridentOptergo AB | Box 220 | SE-435 25 MÖLNLYCKE | +46 31 88 77 27 | info@meridentoptergo.com